



SAS Pro

Podręcznik użytkownika

Zacznij słuchać i poczuć zmianę.




Czterostronicowy ekran powitalny, który pojawia się po pierwszym uruchomieniu aplikacji SAS, ma na celu pomóc Ci odkryć, jak działa SAS Pro i co oferuje.



Szybko nauczysz się podstawowych funkcji i od razu zaczniesz korzystać z aplikacji SAS.

Aby przełączać się między ekranami, wystarczy przesunąć palcem w prawo lub w lewo.

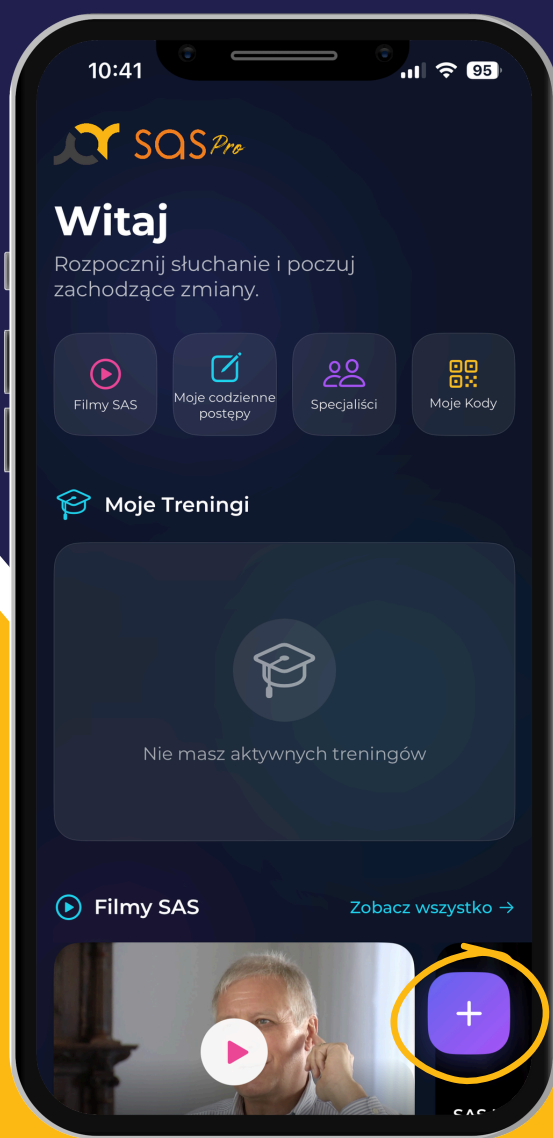


Gdy po raz pierwszy otworzysz aplikację SAS, strona główna stanie się centrum Twojego spersonalizowanego doświadczenia słuchowego.

Za pośrednictwem tego ekranu możesz:

- **Łatwy dostęp do sesji odsłuchowych,**
- **Rejestrować codzienne obserwacje,**
- **Być w kontakcie z dostawcą SAS,**
- **Śledzić cały proces z jednego miejsca.**

Aby rozpocząć pierwszą sesję odsłuchową, wystarczy nacisnąć przycisk „+” w prawym dolnym rogu.

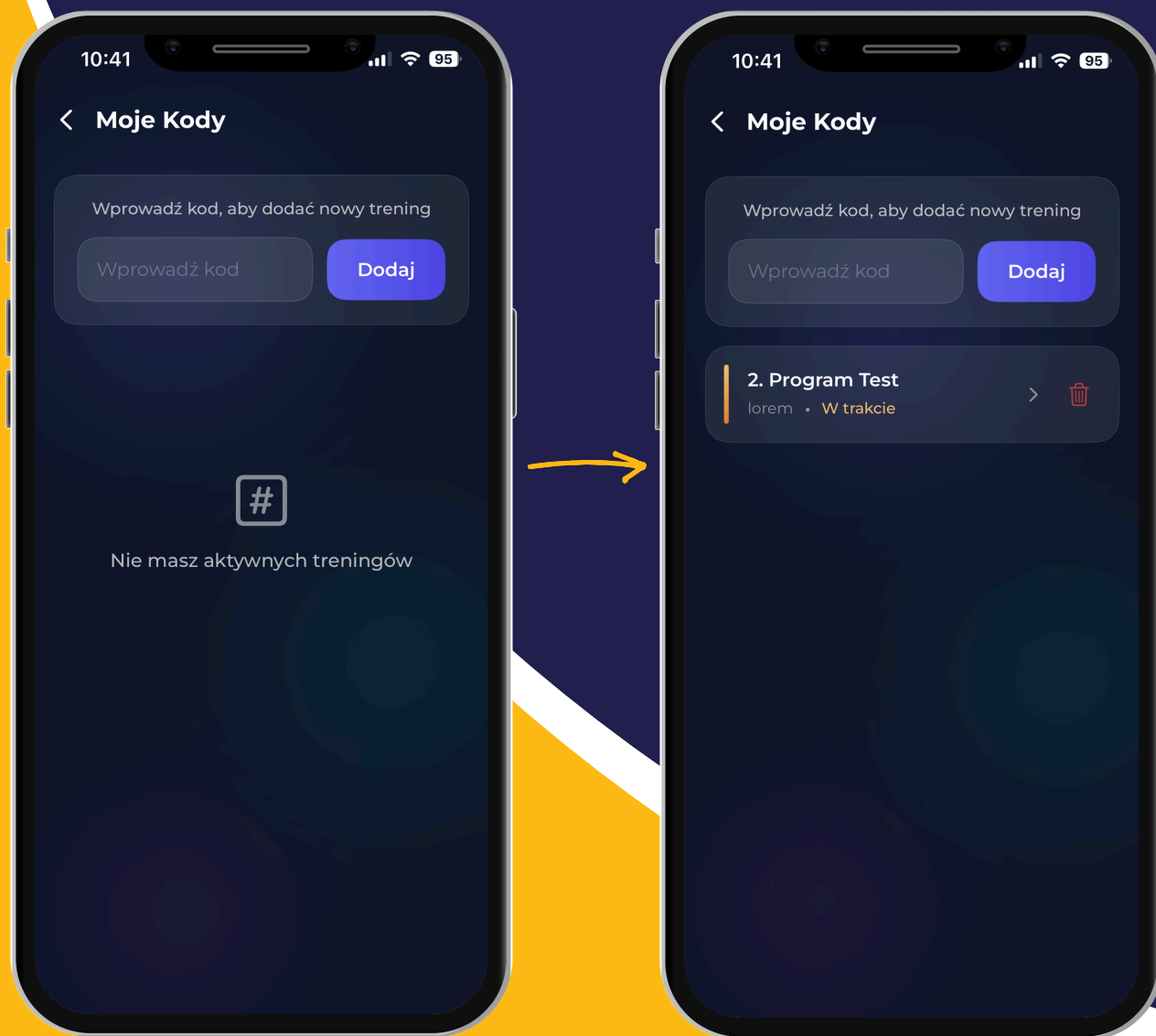

Po kliknięciu przycisku „+” na otwartej stronie możesz dodać 8-znakowy kod kursu.

Wpisz kod kursu w polu u góry, a następnie kliknij przycisk „**Dodaj**”. Jeśli nie dodałeś jeszcze żadnego kodu, na stronie pojawi się komunikat „**Nie masz aktywnych treningów**”.

Po dodaniu kodu kursu wszystkie Twoje aktywne sesje słuchania zostaną wyświetlone w tym obszarze.




Gratulacje!

Po dodaniu kodu kursu Twoja strona główna będzie gotowa do uzupełnienia o spersonalizowane treści.

Tutaj znajdziesz listę swoich kursów rozumienia ze słuchu. Nazwa każdego kursu i postęp są wyświetlane w przejrzysty i systematyczny sposób.


*Klikając karty pod nagłówkami „**Twoje postępy**” i „**Moje Treningi**”, możesz natychmiast uzyskać dostęp do strony ze szczegółami swoich kursów.*

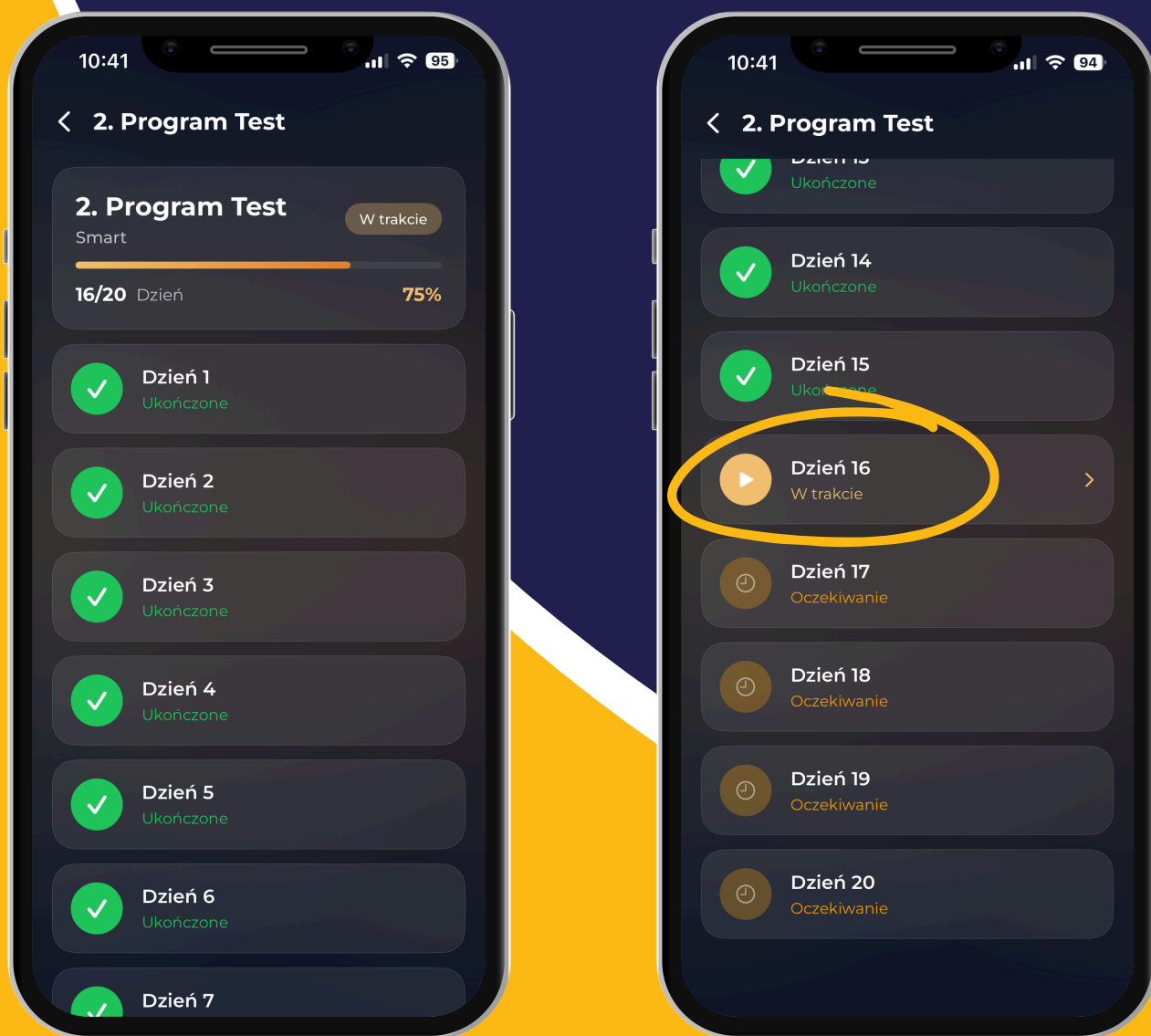

Tutaj znajdziesz szczegółowy wykaz każdego dnia Twojego spersonalizowanego kursu słuchania.

Możesz łatwo sprawdzić status każdego dnia w swoim harmonogramie.

*Po kliknięciu dnia oznaczonego jako „**W trakcie**” zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do ekranu odsłuchu, gdzie możesz bezproblemowo wznowić sesję od miejsca, w którym ją przerwałeś.*

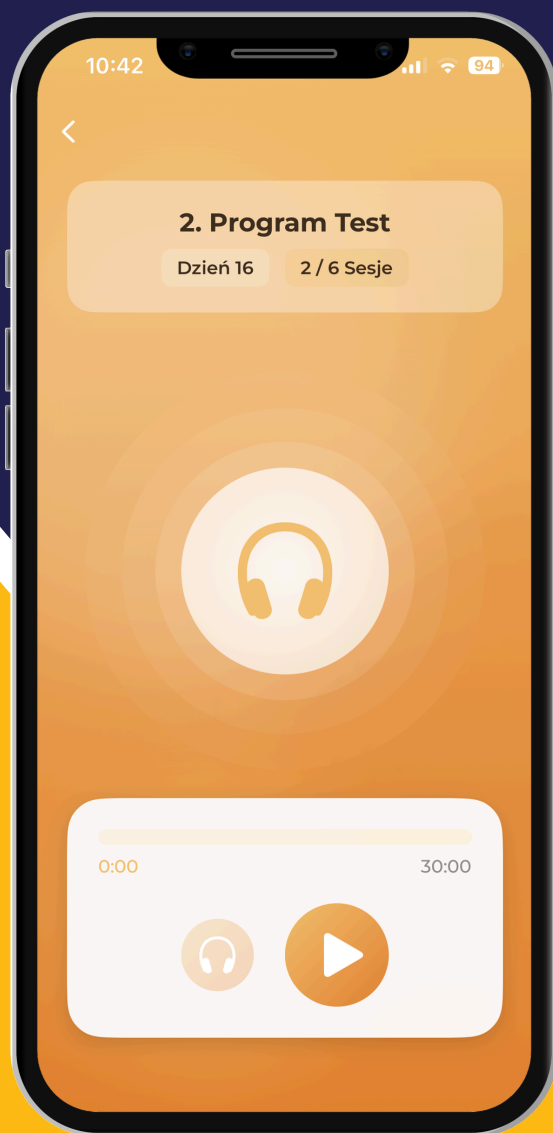

Na dole strony znajdziesz przycisk **Test słuchawek**. Ta sekcja pozwala szybko sprawdzić jakość dźwięku i połączenie słuchawkowe. Możesz kontrolować wrażenia słuchowe za pomocą przycisku **Start/Stop**.

Na tym ekranie wyświetlana jest również nazwa kursu, numer dnia i pasek postępu pokazujący postępy w słuchaniu.

Podczas sesji słuchania możesz na bieżąco śledzić swoje postępy i zarządzać procesem w sposób płynny i kontrolowany.



Kliknięcie przycisku „**Filmy SAS**” na stronie głównej przeniesie Cię na stronę po prawej stronie. Znajdziesz tam starannie wyselekcjonowane archiwum ekskluzywnych filmów z **SAS Centre**.

Możesz wybrać dowolny film z listy i rozpocząć oglądanie.


Filmy oferują dodatkowe informacje i wskazówki, które pomogą Ci w nauce słuchania. Możesz uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie, dzięki czemu nie przegapisz żadnych filmów opartych na badaniach naukowych, które pomogą Ci w postępach.



Po kliknięciu przycisku „**Moje codzienne postępy**” na stronie głównej zostaniesz przekierowany na stronę po prawej stronie.

Jeśli nie dodałeś jeszcze żadnych notatek, zobaczysz komunikat „**Brak notatek**”. Możesz łatwo dodać nową notatkę, dotykając przycisku „+” w prawym dolnym rogu.

W tej przestrzeni możesz wygodnie śledzić swoje codzienne obserwacje, odczucia i myśli, a także osobiste notatki sporządzone podczas sesji słuchowych.

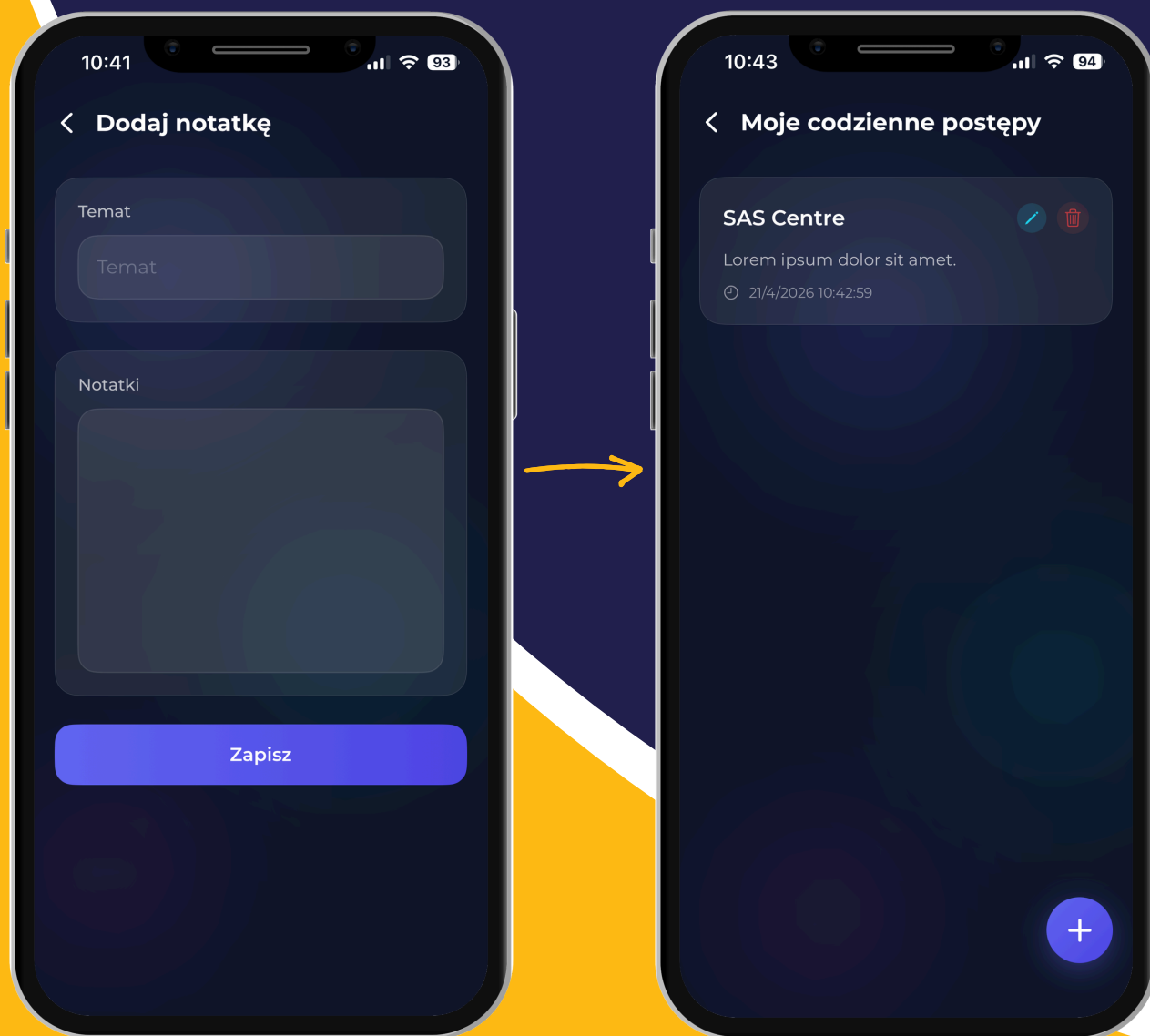

Po kliknięciu przycisku „+” na stronie „**Moje codzienne postępy**” otwiera się ekran dodawania notatek.

Po wprowadzeniu wymaganych informacji na tym ekranie możesz zapisać notatkę, klikając przycisk „**Zapisz**”.

Po zapisaniu otworzy się drugi ekran po prawej stronie, w którym możesz użyć ikony pióra, aby edytować dodane notatki, lub ikony usuwania, aby je usunąć.



Po kliknięciu przycisku „**Specjaliści**” na stronie głównej zostaniesz przekierowany na stronę po prawej stronie.

Tutaj znajdziesz nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail swojego dostawcy SAS.

Możesz szybko i łatwo skontaktować się ze swoim dostawcą SAS, kiedy tylko tego potrzebujesz.



Po kliknięciu przycisku „**Moje Kody**” na stronie głównej wszystkie dodane wcześniej kody kursów zostaną wyświetlone w uporządkowany sposób.

Proces wstawiania kodu przebiega według takiej samej struktury jak „**Strona wstawiania kodu**” opisana w poprzedniej sekcji.

Aby usunąć kod, możesz użyć ikony usuwania znajdującej się obok kodu.



Gratulacje!

Ukończyłeś podręcznik użytkownika SAS Pro.

Teraz możesz z łatwością i pewnością korzystać z opracowanych na podstawie badań naukowych, spersonalizowanych programów słuchowych.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w jakiegokolwiek sprawie, możesz skontaktować się z nami za pomocą następujących kanałów:

Adres e-mail: info-pl@sascentre.com

Telefon: +48 505 981 381 (9:00-17:00)